



Кровать медицинская функциональная электрическая МВ-93

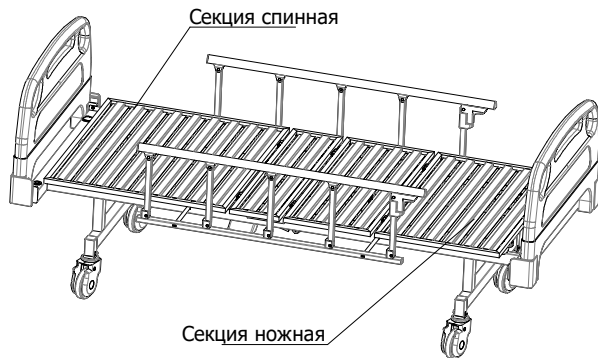

Установка ножек

Соедините ножки кровати с основанием с помощью винтов М8х16 и гек М8.

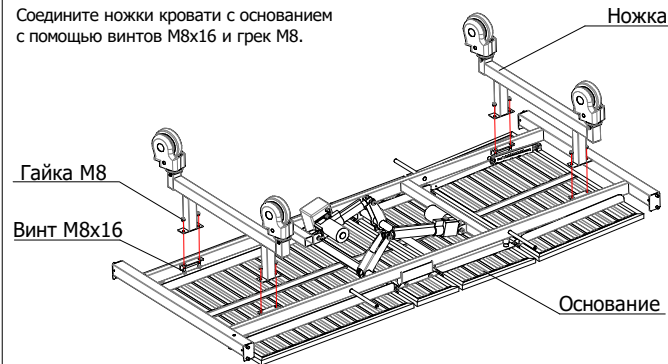

Закрепление провода заземления

Установка приводов

Установка блока управления

Привод тазобедренной секции



2

Примечание: колеса с тормозом устанавливать по диагонали.

Установка спинок и боковых ограждений



3

Предварительно снять колпачки защитные с кронштейнов спинок

1

1. Соедините привода с кронштейнами с помощью винтов М10х60 и гаек М10.
2. Блок управления следует установить на привод тазобедренной секции (полоса на приводе и на блоке). В порт № 1 подключить привод спинной секции, в порт № 2 привод тазобедренной секции, в порт № 3 пульт управления приводами.
3. Присоедините провод заземления